



reducecept

Dashboardhandleiding

Versie: 9 maart 2021



Dashboard

Het Reducept-dashboard is speciaal ontwikkeld voor behandelaars. Via het dashboard kunt u verschillende gebruikers en apparaten beheren en de prestaties van de verschillende spelers onder uw behandeling inzien.

Inhoud

Goed om te weten, voordat je begint	3
Toegang tot het dashboard	5
Hoe maak je nieuwe spelers	6
Hoe de spelersstatistieken te bekijken	8
Hoe apparaten aan uw organisatie te koppelen	10
Hoe log je spelers in en uit een VR set	12
Hoe kan ik het thuisgebruik toestaan?	14
Hoe verleng je een licentie	17
Hoe kunt u van taal veranderen	20
Hoe kan ik meerdere spelers tegelijk verwijderen?	21
Hoe te sorteren op een bepaalde kolom	23





Goed om te weten, voordat je begint

Leuk dat je Reducept uit gaat proberen! We gaan je hier nog even wat vertellen over het product, meteen daarna vind je instructie hoe je het dashboard van Reducept kunt gebruiken.

Doelgroep

Reducept is ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. Chronische pijn wordt gedefinieerd als voortdurende of terugkerende pijn, die langer aanhoudt dan de normale genezingsperiode voor een ziekte of verwonding, of die langer dan drie tot zes maanden duurt. Reducept is getest bij mensen tussen de 18 en 80 jaar. Bij jongere kinderen hebben wij geen data over de werkzaamheid van het product. Bij mensen van 65 jaar of ouder is er vaak hulp nodig bij het installeren en kennismaken van het programma, maar vervolgens kunnen ook ouderen verbeteringen boeken met het programma.

Mogelijke risico's

Reducept gebruik je op eigen risico. Op dit moment heeft de app zelf weinig bekende risico's. Wel kan het gebeuren, dat je patiënt last krijgt van het spelen op het VR-Headset. Mocht hij tijdens het spelen meer pijn ervaren, laat hem dan direct stoppen met spelen en contact op je opnemen.

Voor mogelijke risico's die het spelen op de VR-Headset inhouden, raden we aan de handleiding van de VR-Headset door te lezen.

Verder is het mogelijk dat je patiënt duizelig wordt door het kijken op de scherm. Als hij dit ervaart, laat hem stoppen met spelen en contact met je opnemen.

Ondanks de psychosociale insteek van Reducept en het relatief lage risico van de interventie, zijn er een aantal criteria die goed zijn om aan te houden wanneer je Reducept gebruikt. We raden af de Reducept te gebruiken bij:

- Psychotische stoornissen: elke stoornis waarbij een patiënt lastig het onderscheid kan maken tussen werkelijkheid en de fictieve wereld van VR kan mogelijk tot een toename van verwarring leiden
- Dementie: elke stoornis waarbij een patiënt lastig het onderscheid kan maken tussen werkelijkheid en de fictieve wereld van VR kan mogelijk tot een toename van verwarring leiden
- Psychiatrische comorbiditeit: we adviseren psychiatrische comorbide stoornissen te behandelen alvorens Reducept toe te passen
- Jonger dan 18 jaar: Reducept is ontwikkeld voor volwassenen. Op moment van schrijven wordt haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de toepassing van Reducept bij jongeren



- Audiovisuele stoornissen: wanneer deze het gebruik van VR hinderen

Huidige staat van onderzoek

Binnen Reducept maken wij gebruik van verschillende psychologische behandeltechnieken. Bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, acceptance en commitment therapie, Mindfulness en Hypnotherapie¹. Deze technieken zijn in het verleden veel onderzocht en hebben hun effectiviteit bewezen.

Ook virtual Reality (VR) werd in de laatste tijd veel onderzocht naar de effectiviteit bij behandeltechnieken met veelbelovende resultaten.

Reducept heeft ervoor gekozen om de goed onderzochten psychologische behandeltechnieken te combineren met VR. Om de succes van Reducept te onderzoeken zijn er op dit moment diverse studies gaande.

Voor meer informatie kijk op de website: reducept.com/nl/onderzoek.

CE mark

Reducept heeft een CE-markering. Deze markering verklaart dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte. Het CE nummer is: 2019/682-01


¹ Fennema & Zantema, 2019






Toegang tot het dashboard

1. Reducept stuurt een e-mail met een uitnodiging om een account aan te maken op het dashboard. Klik op de link om naar het dashboard te gaan.
2. Kies een wachtwoord en bevestig uw wachtwoord op het inlogscherm.

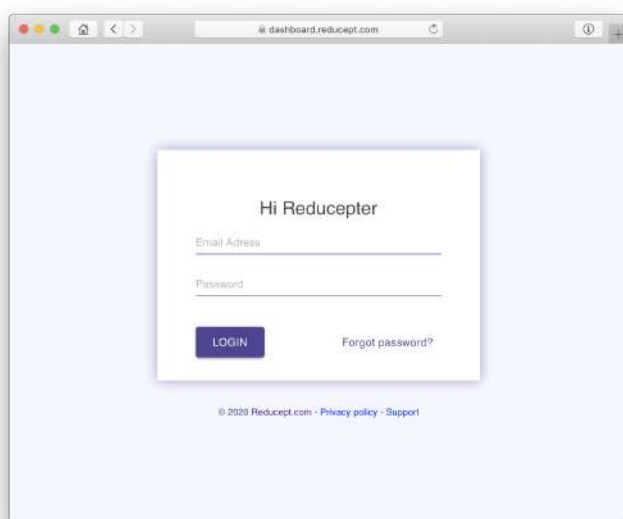


3. U ziet nu het startscherm van het dashboard met een overzicht van de activiteit van uw spelers in de afgelopen maand.

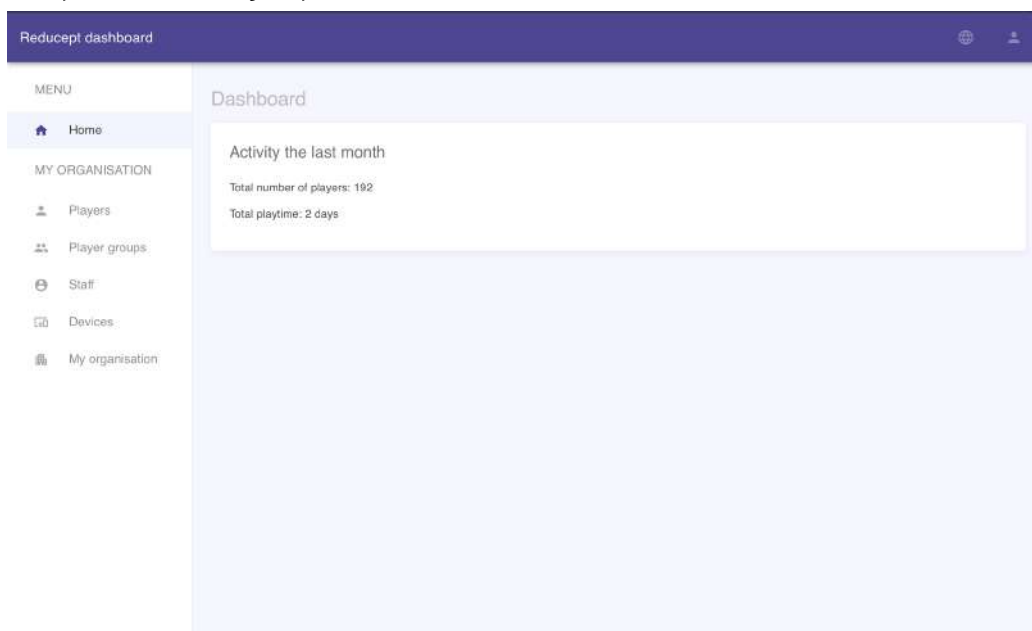




Hoe maak je nieuwe spelers

1. Open het menu 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'.

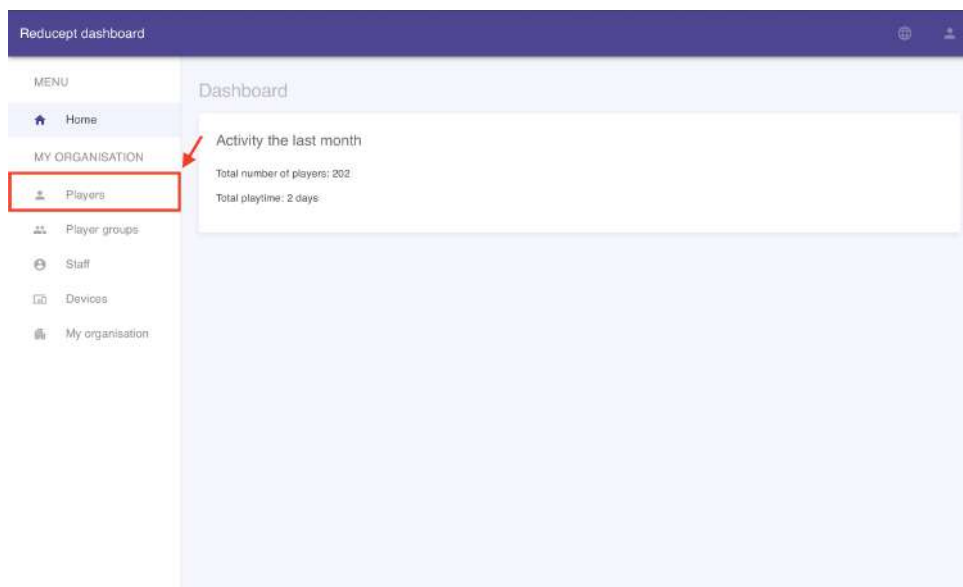

2. U ziet nu een overzicht van alle spelers die aan uw organisatie zijn gekoppeld. Klik op de knop 'Speler toevoegen'.

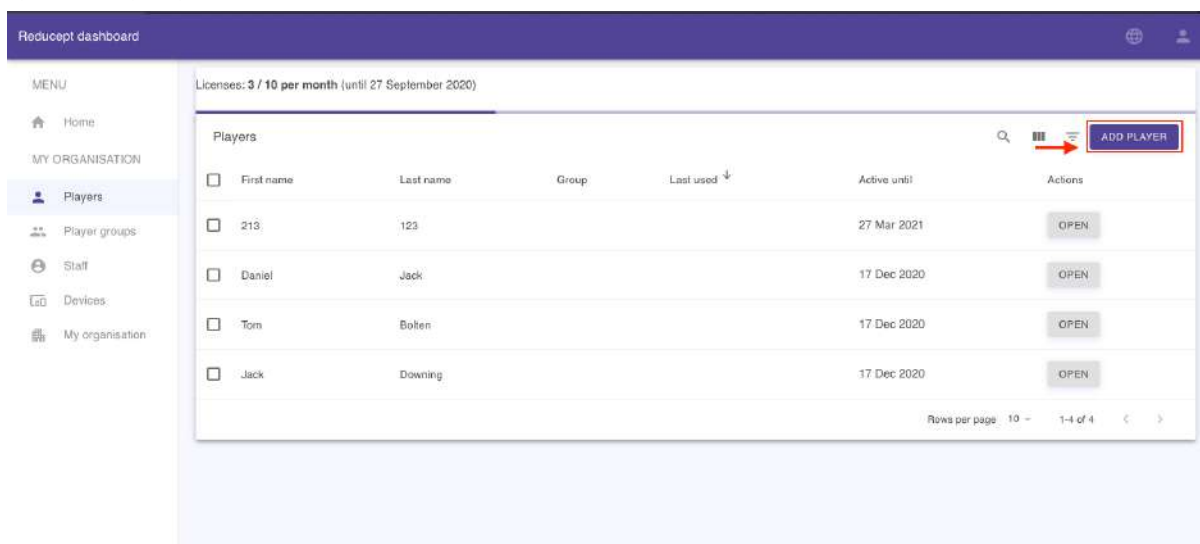

3. In het speleroverzicht verschijnen verschillende lege invoervelden. (OPMERKING: Als het thuisgebruik niet is ingeschakeld, is de e-mail niet nodig)



Add Player

First name* _____ Last name* _____

Email* _____

Group _____

Allow home usage **HOME USAGE ENABLED**

CANCEL SAVE

4. Vul de gegevens van de nieuwe speler in en klik vervolgens op de knop 'Opslaan'.

Add Player

First name* _____ Last name* _____
Jack Ryan

Email _____

Group _____

Allow home usage **HOME USAGE DISABLED**

CANCEL **SAVE**

5. De nieuwe speler is toegevoegd en verschijnt in het speloverzicht.

Licenses: 26 / 1000 per month (until 28 September 2020)

Search: Ryan x [Icons] ADD PLAYER


<input type="checkbox"/>	First name	Last name	Group	Last used ↓	Active until	Actions
<input type="checkbox"/>	Jack	Ryan			10 Dec 2020	OPEN

Rows per page: 10 1-1 of 1 < >




Hoe de spelersstatistieken te bekijken

1. Open het menu 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'.

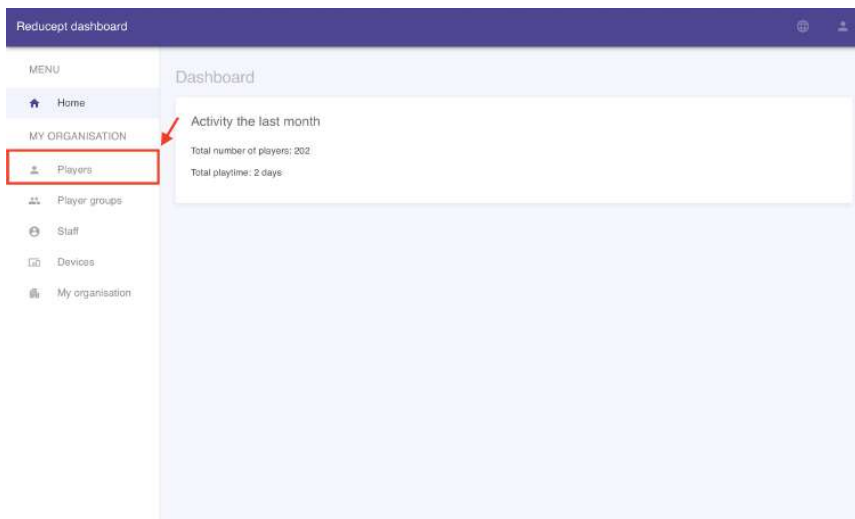

2. Klik op de knop "Openen" van de speler waarvoor u de statistieken wilt bekijken.

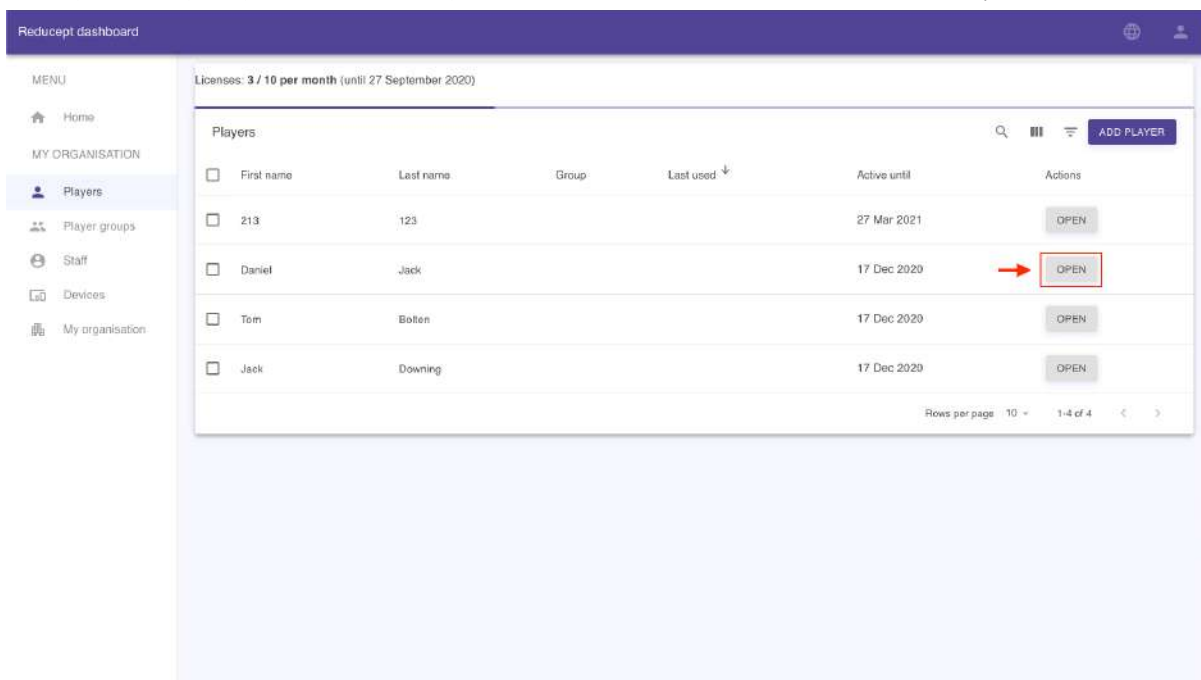




3. In het statistiekscherm kunt u een overzicht zien van de sessies die deze speler tot nu toe heeft gespeeld binnen de geselecteerde periode.



4. U kunt de statistieken van een bepaalde periode bekijken door de begin- en einddatum van de gewenste periode in te voeren onder 'Periodekeuze'. Het statistiekscherm toont nu de spelersstatistieken van de gewenste periode.

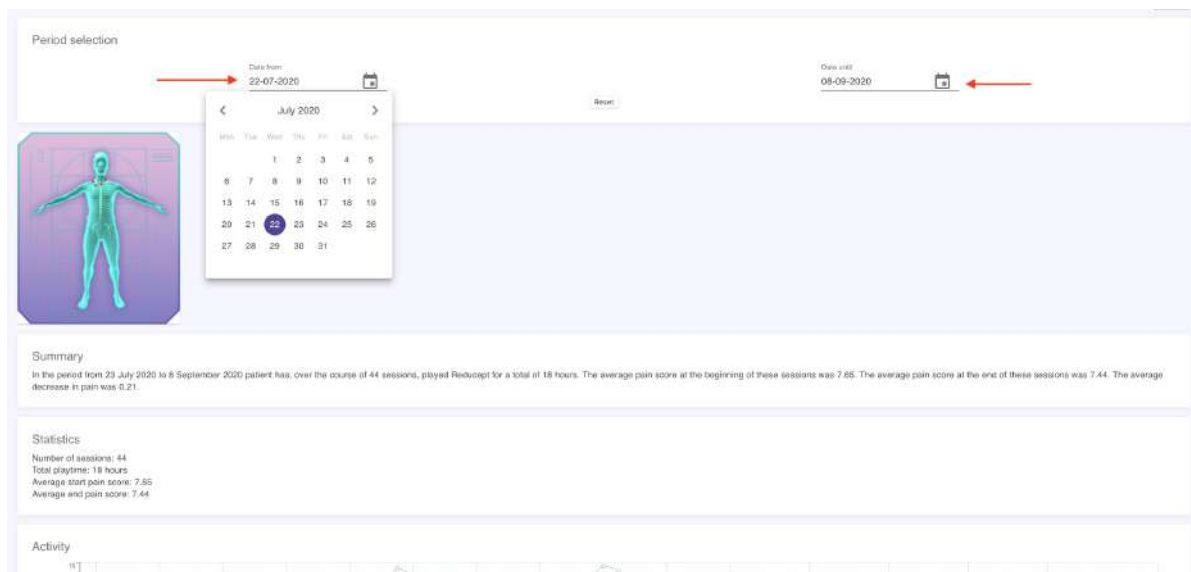




Hoe apparaten aan uw organisatie te koppelen


Wanneer u inlogt op uw VR-headset, Android of iPhone met uw inloggegevens, wordt deze automatisch toegevoegd aan het dashboard.

Het kan nuttig zijn om de naam van uw apparaat te wijzigen. U doet dit in het dashboard:

1. Open het menu 'Apparaten' onder 'Mijn organisatie'.

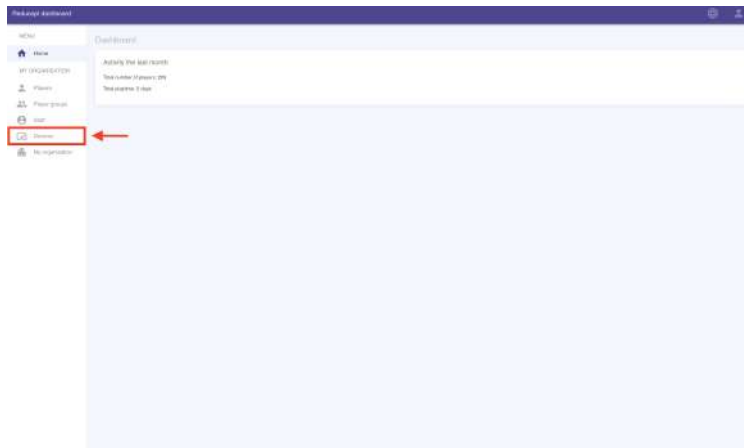

2. U ziet het overzichtsscherm van het apparaat waar het nieuwe apparaat aan het overzicht is toegevoegd.

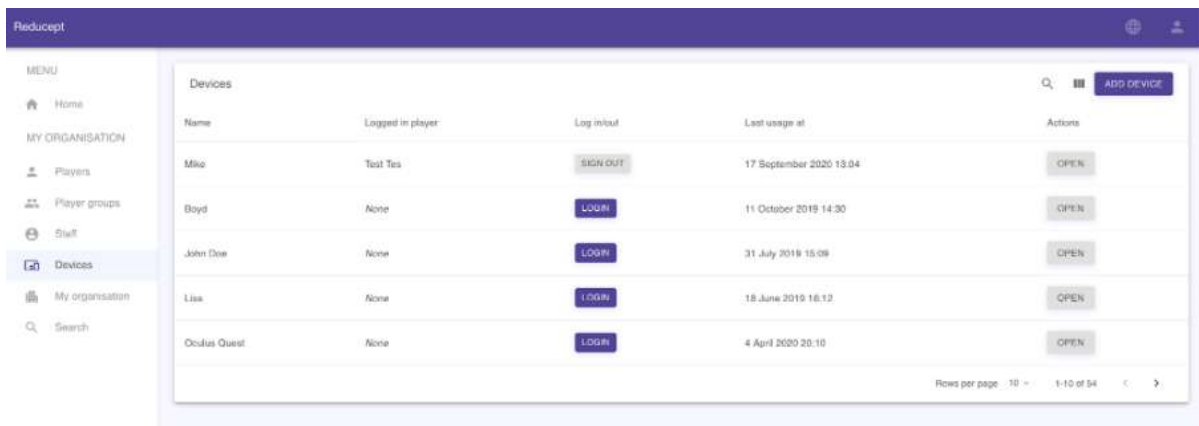

3. Klik op 'Openen'



Reducept

MENU

- Home

MY ORGANISATION


- Players
- Player groups
- Staff
- Devices**
- My organisation
- Search

Devices


Name	Logged in player	Log in/out	Last usage at	Actions
Mike	Test Tes	SIGN OUT	17 September 2020 13:04	OPEN
Boyd	None	LOGIN	11 October 2019 14:30	OPEN
John Doe	None	LOGIN	31 July 2019 15:09	OPEN
Lisa	None	LOGIN	18 June 2019 16:12	OPEN
Oculus Quest	None	LOGIN	4 April 2020 20:10	OPEN

Rows per page: 10 - 1-10 of 54

4. Er verschijnt een dialoogvenster met de bijbehorende informatie.

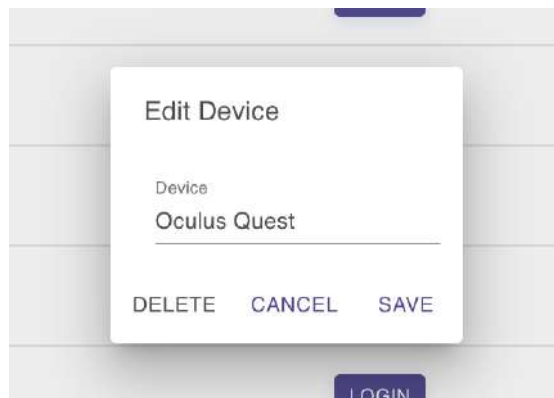

5. Verander nu de naam en druk op 'Opslaan'.

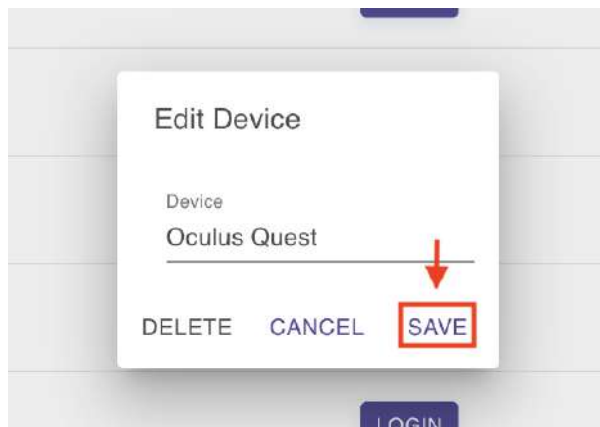



Hoe log je spelers in en uit een VR set


1. Open het scherm 'Apparaten' onder 'Mijn organisatie'. U ziet het scherm met het overzicht van de apparaten.

Name	Logged in player	Log in/out	Last usage at	Actions
Mike	Test Tes	SIGN OUT	17 September 2020 13:04	OPEN
Boyd	None	LOGIN	11 October 2019 14:30	OPEN
John Doe	None	LOGIN	31 July 2019 15:09	OPEN
Lisa	None	LOGIN	18 June 2019 16:12	OPEN
Oculus Quest	None	LOGIN	4 April 2020 20:10	OPEN

2. Klik op de knop 'Login' naast het apparaat dat u wilt gebruiken.

Name	Logged in player	Log in/out	Last usage at	Actions
Mike	Test Tes	SIGN OUT	17 September 2020 13:04	OPEN
Boyd	None	LOGIN	11 October 2019 14:30	OPEN
John Doe	None	LOGIN	31 July 2019 15:09	OPEN
Lisa	None	LOGIN	18 June 2019 16:12	OPEN
Oculus Quest	None	LOGIN	4 April 2020 20:10	OPEN

3. Selecteer de naam van de speler waar u wilt inloggen en klik op 'Opslaan'.

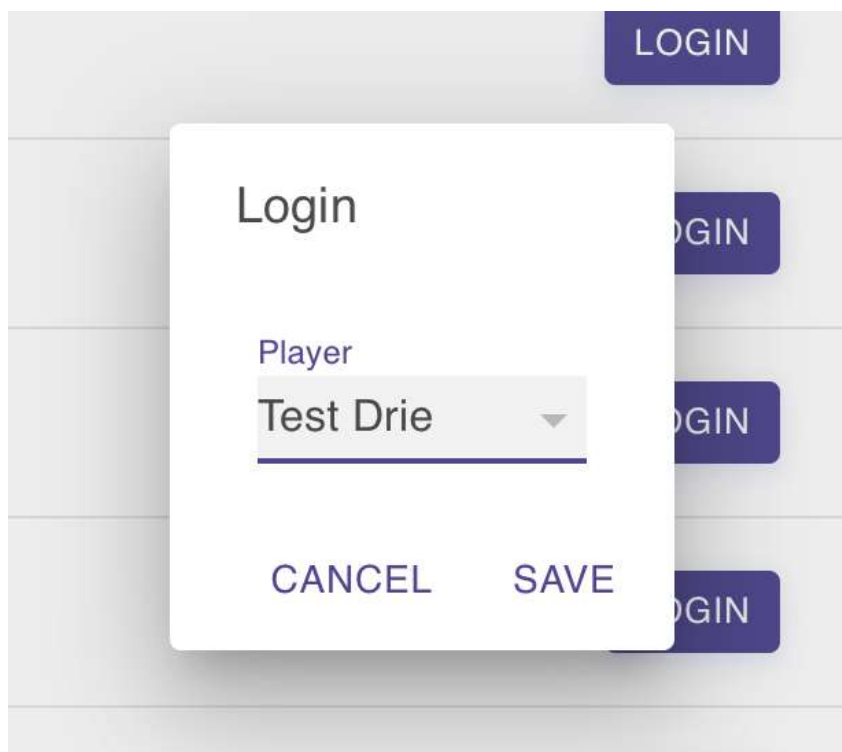


4. De geselecteerde speler is nu gekoppeld aan het apparaat!




Hoe kan ik het thuisgebruik toestaan?

1. Open het scherm 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'. U ziet het scherm met het speloverzicht.

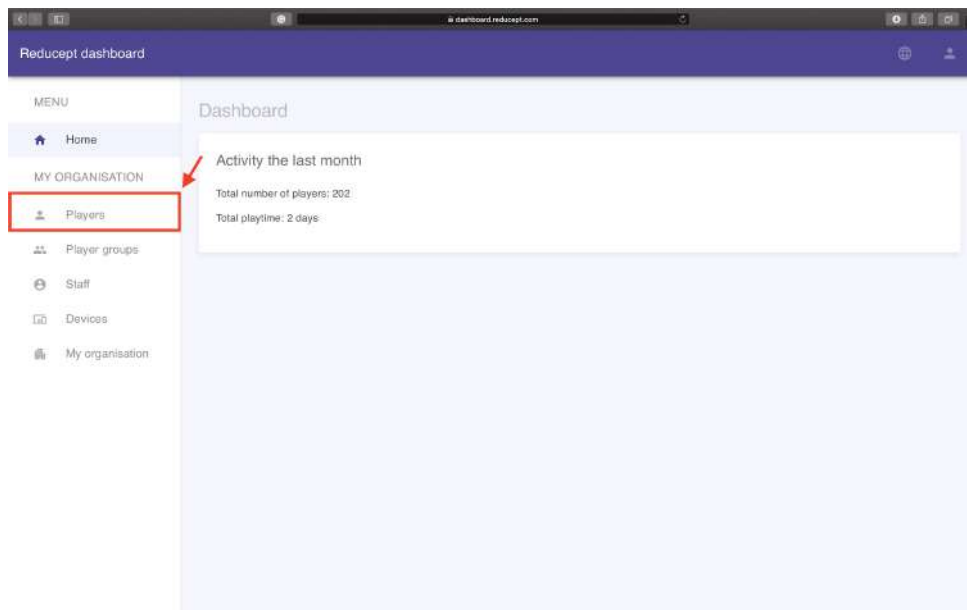


2. Klik in het speloverzicht op de knop 'Openen' voor de nieuwe speler.

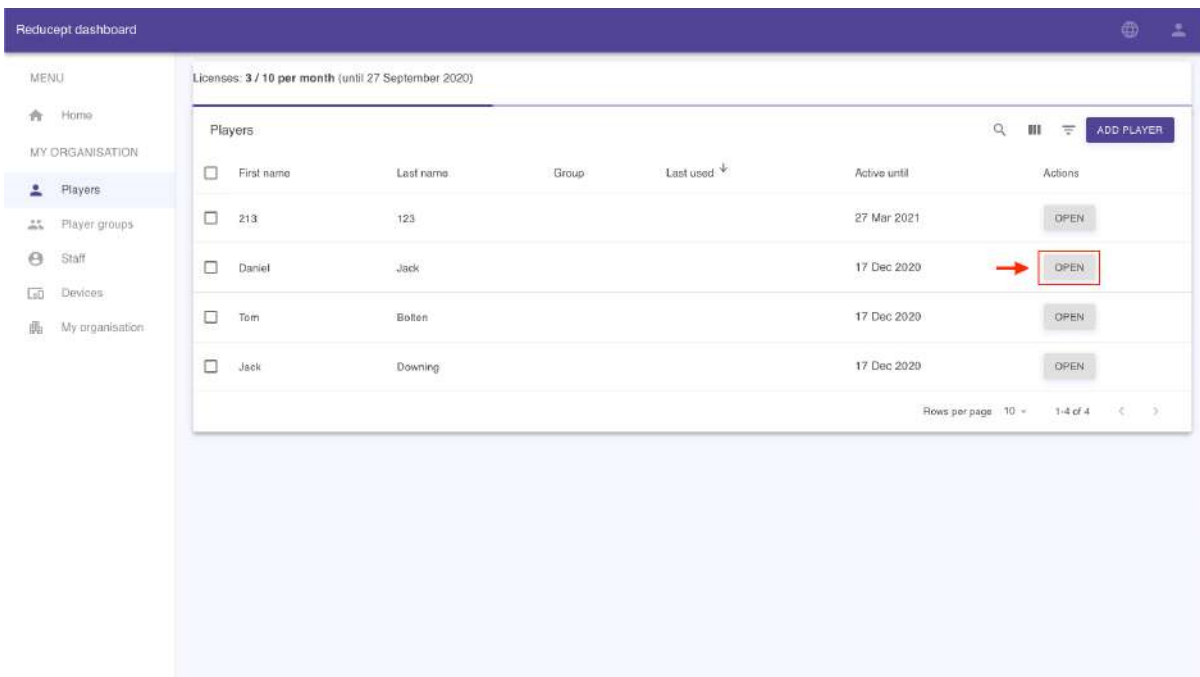



3. Klik op 'Bewerken'.

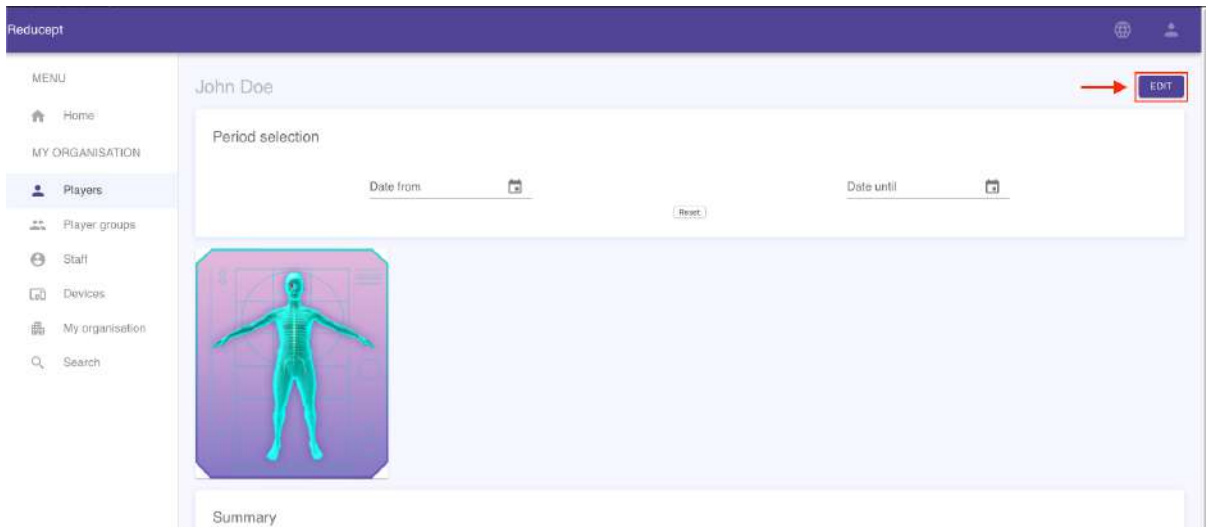

4. Klik op de knop 'Thuisgebruik activeren' en vul het e-mailadres in.

Edit player

First name * Last name *

Email

Group

Status

Allow home usage



5. U zult nu zien dat de badge van rood naar groen gaat. Klik nu op 'Opslaan'.

Edit player

First name * Last name *

Email *

Group

Status


Allow home usage

6. De speler zal een e-mail ontvangen met instructies voor het aanmaken van een Reducept-account voor thuisgebruik.




Hoe verleng je een licentie

1. Open het scherm 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'. U ziet het scherm met het speloverzicht.

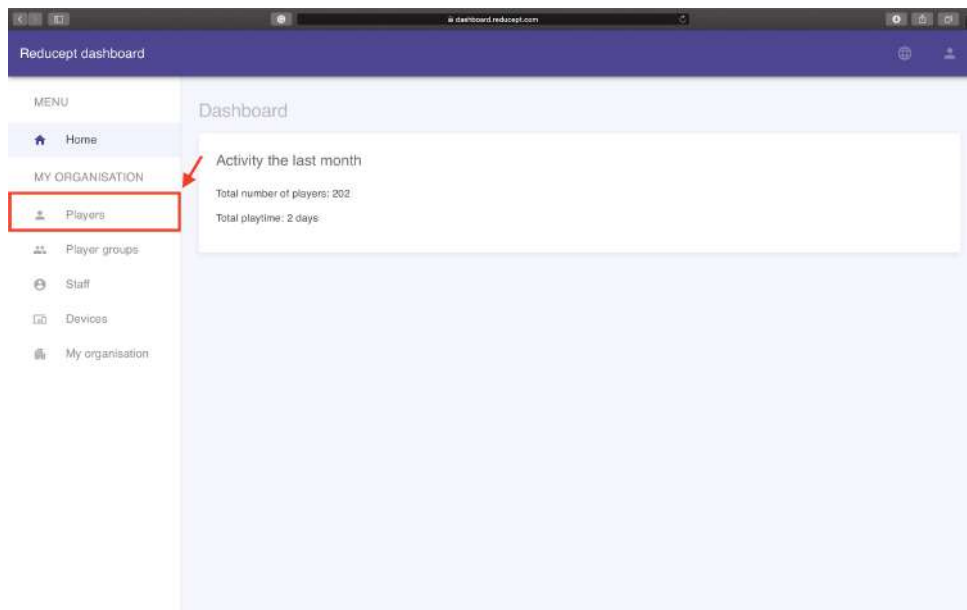


2. Klik in het speloverzicht op de knop 'Openen' voor de nieuwe speler.

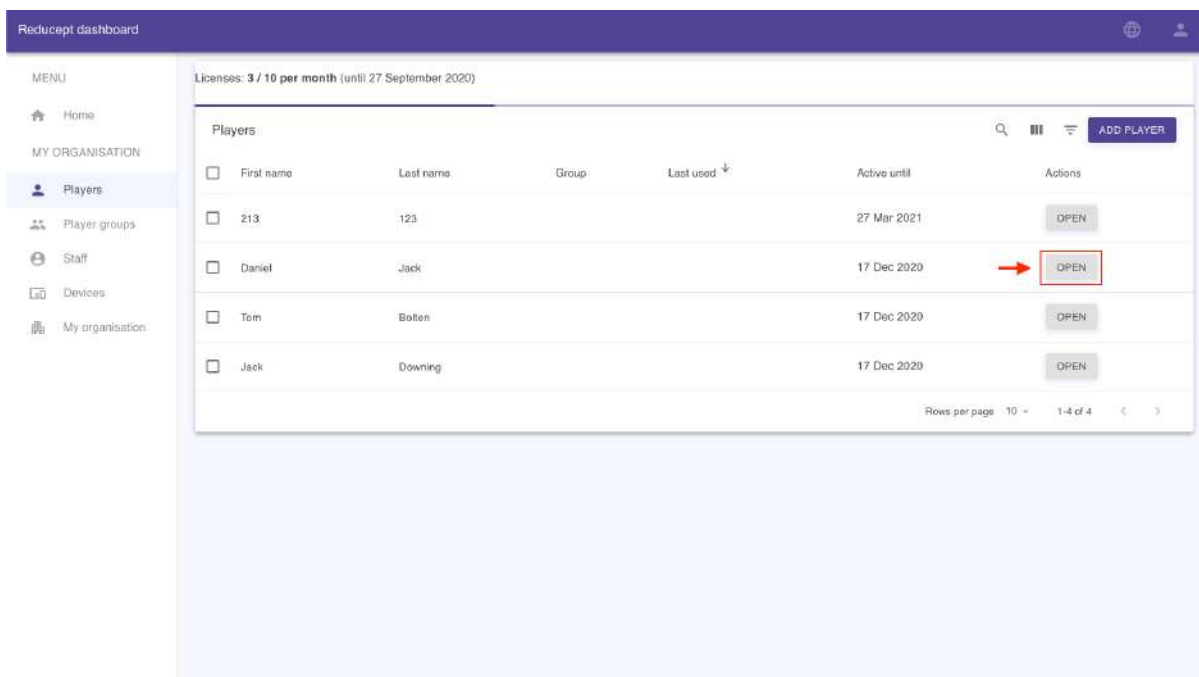




3. Klik op 'Bewerken'.

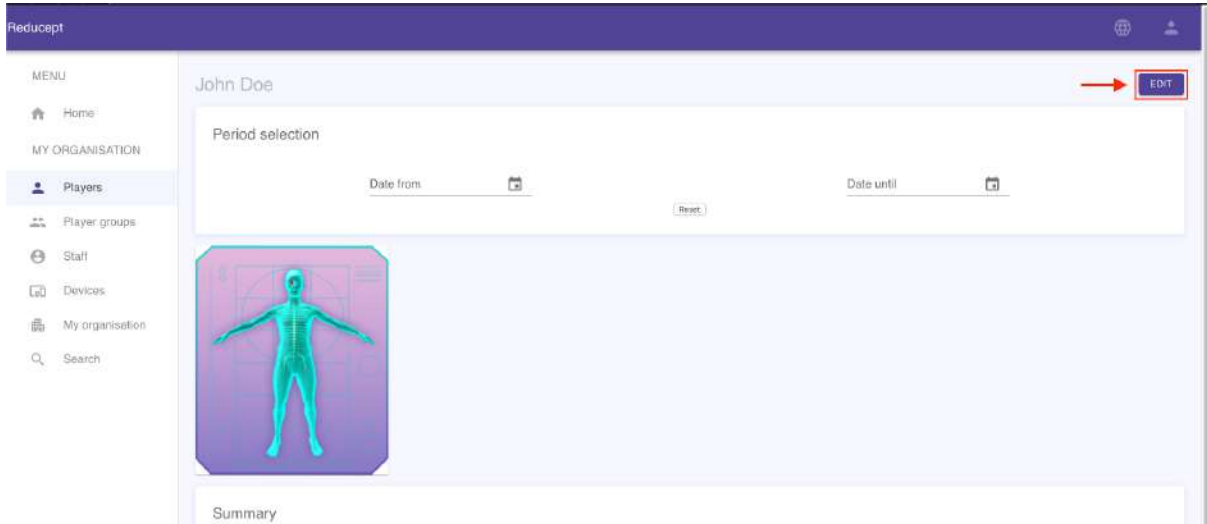

4. Klik op Verlenging met 3 maanden

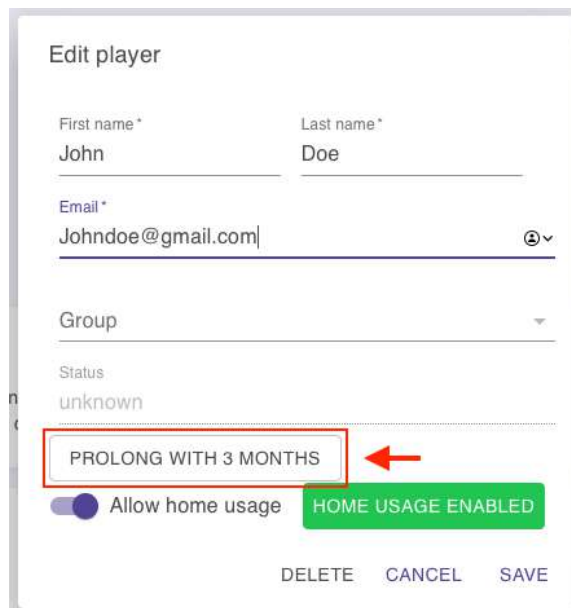



5. Klik nu op 'Opslaan'.

Edit player

First name *	Last name *
John	Doe

Email *

Johndoe@gmail.com

Group

Status

unknown

PROLONG WITH 3 MONTHS


Allow home usage **HOME USAGE ENABLED**

DELETE CANCEL **SAVE**




Hoe kunt u van taal veranderen

1. Selecteer dit gemarkeerde pictogram op de werkbalk

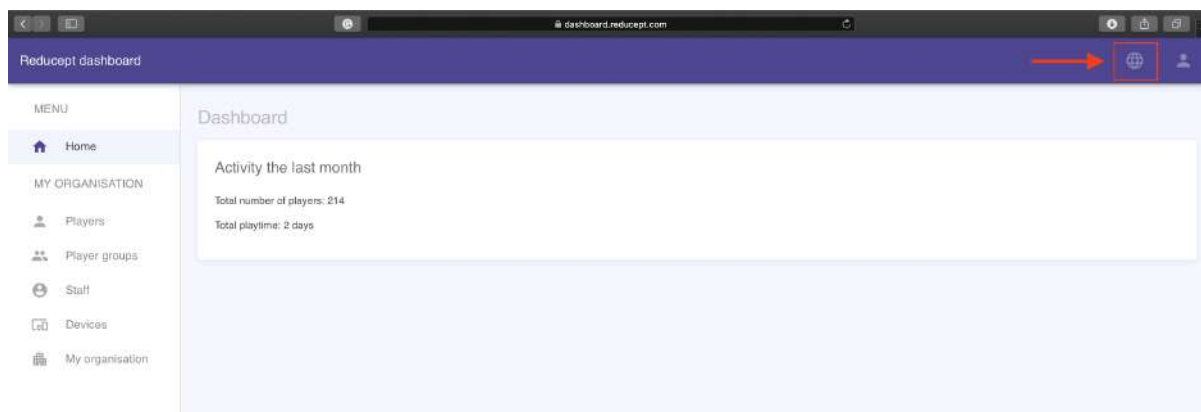

2. Selecteer uw voorkeurstaal

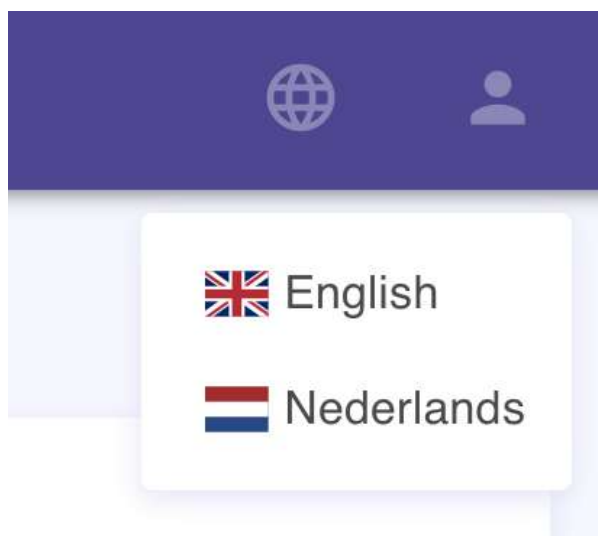


3. Dat is het.




Hoe kan ik meerdere spelers tegelijk verwijderen?

1. Open het scherm 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'. U ziet het scherm met het speloverzicht.

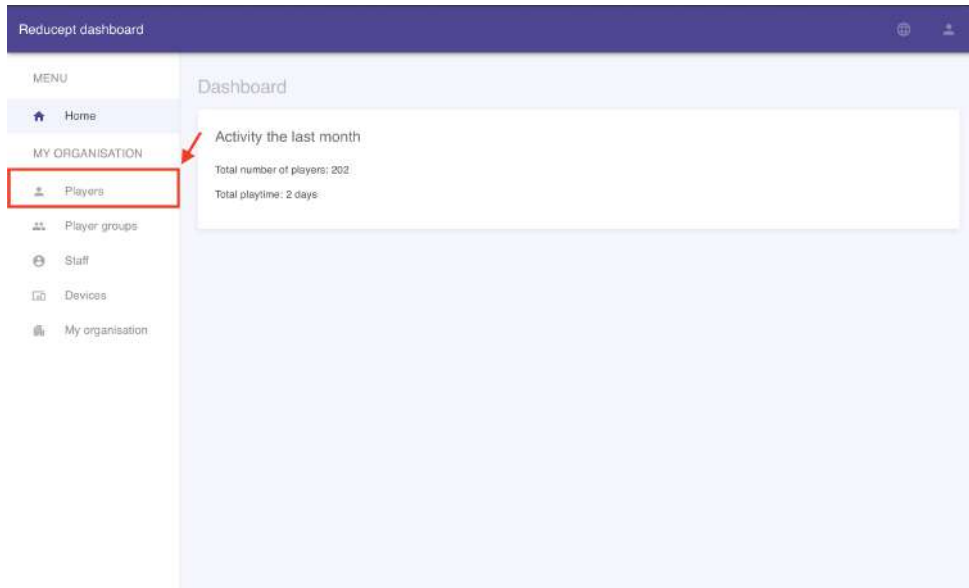

2. Selecteer welke spelers u wilt verwijderen met behulp van het meest linkse vakje voor elke speler.

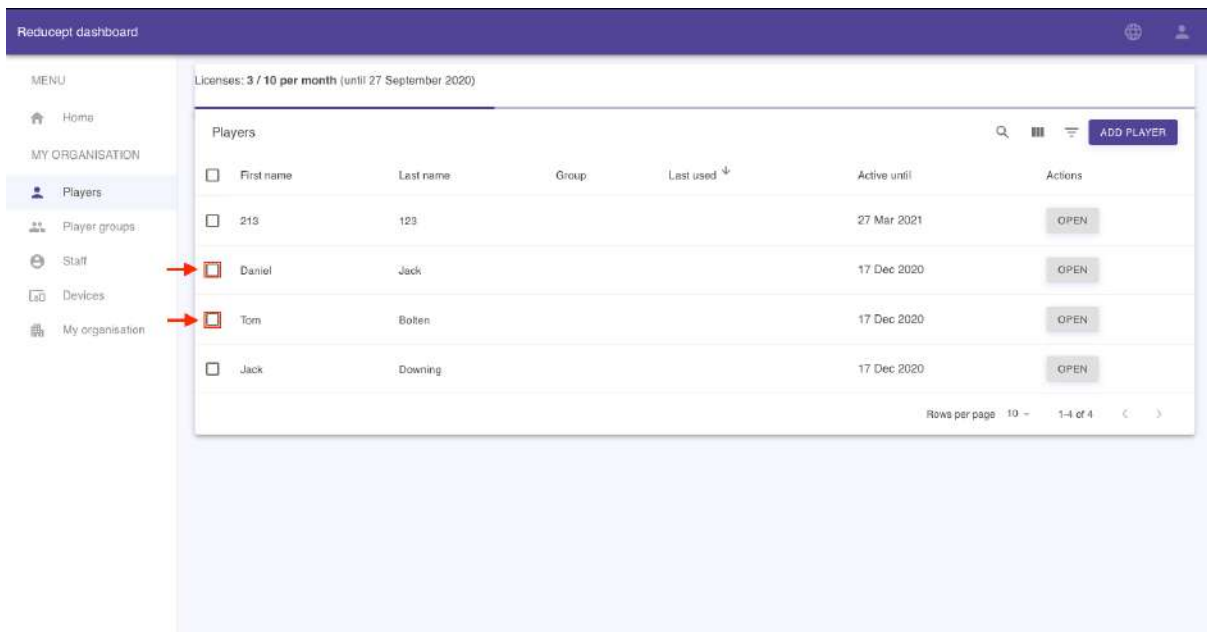



3. Klik dan in de rechterbovenhoek op het pictogram voor verwijderen, gevolgd door een "ja" in het bevestigingsdialogvenster.

Reducept dashboard

Licenses: 3 / 10 per month (until 27 September 2020)

2 row(s) selected

<input type="checkbox"/>	First name	Last name	Group	Last used ↓	Active until	Actions
<input type="checkbox"/>	213	123			27 Mar 2021	OPEN
<input checked="" type="checkbox"/>	Daniel	Jack			17 Dec 2020	OPEN
<input checked="" type="checkbox"/>	Tom	Bolten			17 Dec 2020	OPEN
<input type="checkbox"/>	Jack	Downing			17 Dec 2020	OPEN

Rows per page: 10 - 1-4 of 4

4. Klik op de gewenste optie:

Delete Players?

Are you sure you want to delete these Players?


NO YES

5. Gedaan!




Hoe te sorteren op een bepaalde kolom

1. Open het scherm 'Spelers' onder 'Mijn organisatie'. (Dit kan in elke andere sectie gedaan worden, bijv. in spelersgroepen)

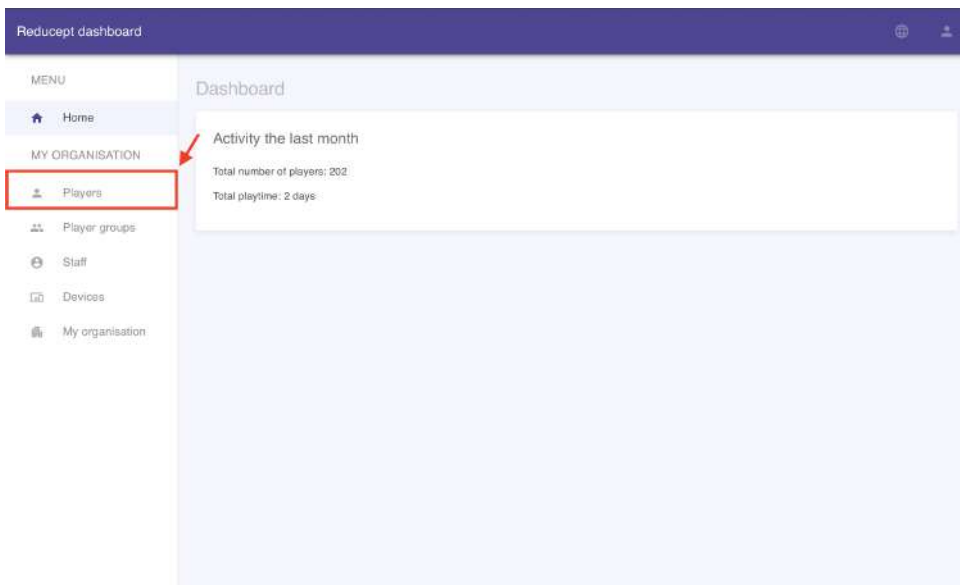

2. Klik op een kolom die een tooltip toont indien echter over de kolomnaam.

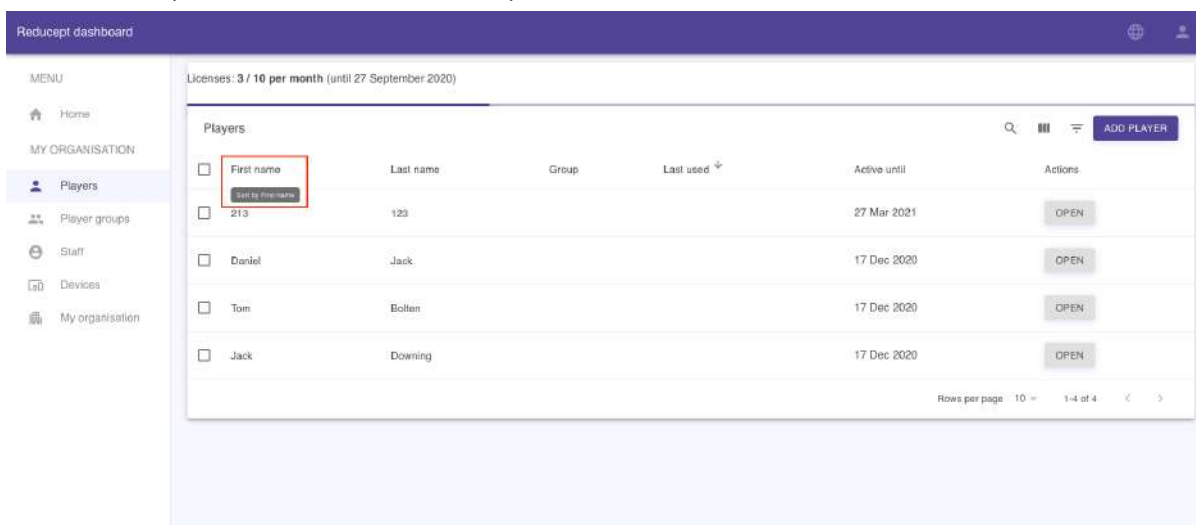

3. U kunt dan de gesorteerde lijst in uw eigen belang bekijken!



Reducept dashboard

MENU

- Home

MY ORGANISATION

- Players**
- Player groups
- Staff
- Devices
- My organisation

Licenses: 3 / 10 per month (until 27 September 2020)

Players

<input type="checkbox"/>	First name ↑	Last name	Group	Last used	Active until	Actions
<input type="checkbox"/>	213	123			27 Mar 2021	OPEN
<input type="checkbox"/>	Daniel	Jack			17 Dec 2020	OPEN
<input type="checkbox"/>	Jack	Downing			17 Dec 2020	OPEN
<input type="checkbox"/>	Tom	Bollen			17 Dec 2020	OPEN

Rows per page: 10 - 1-4 of 4 < >

ADD PLAYER

